


Стоматологические зеркала Dialog

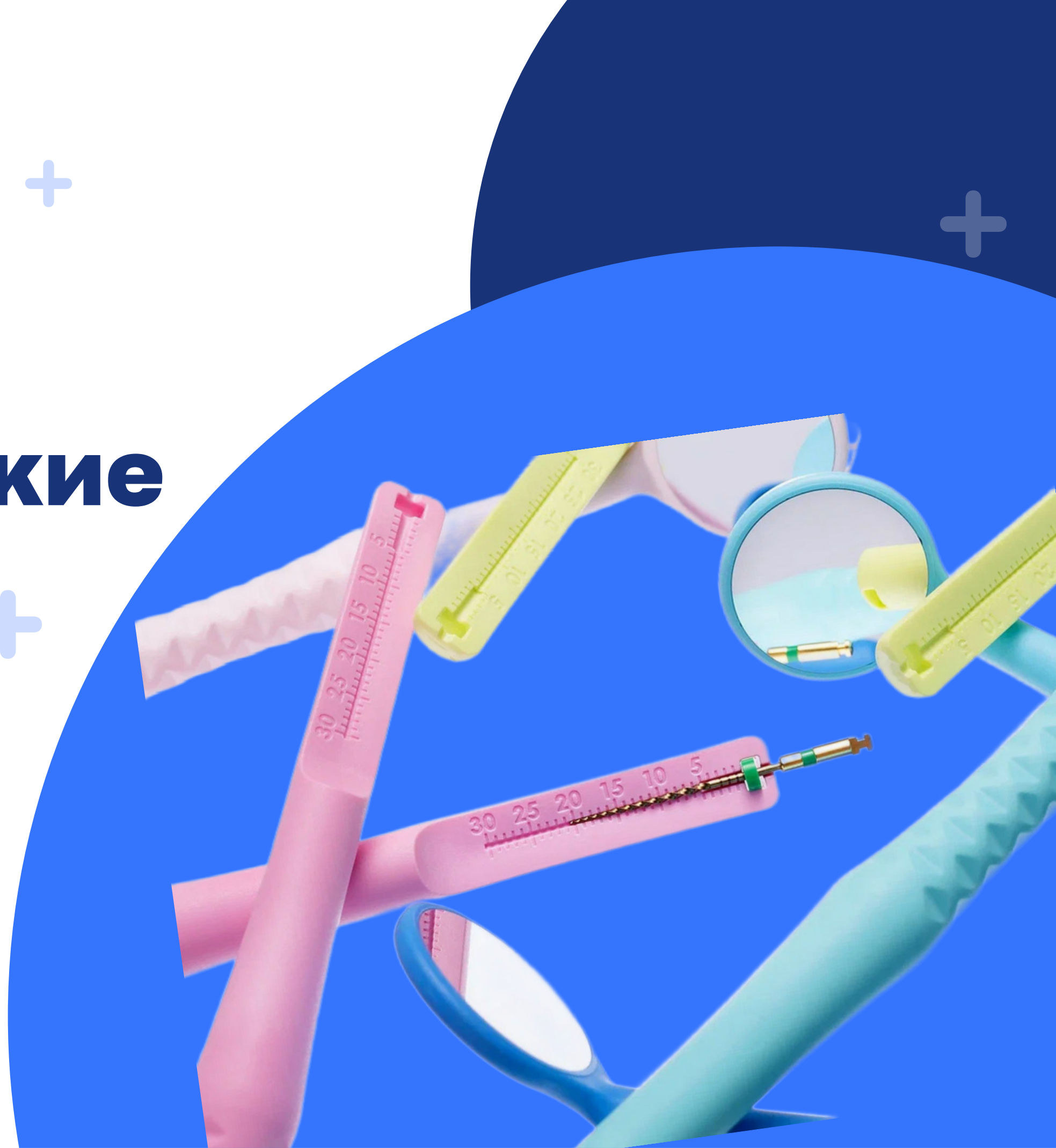

Преимущества зеркал линейки M



Ультраяркие



Система
AirClean



Перераба
тываемые
материалы



Цветная
кодировка



Многослойное
покрытие



Подсветка



2 батарейки



3-осевое
вращение



Замена
зеркала



Легко
соединяются



Европейская
сертификация



Всасывание



Описание	с подсветкой	с эндо-линейкой	с AirClean системой	микрозеркала с AirClean системой	зеркала для дентальной фотографии с AirClean системой	с подключением к аспирационной системе
Коэффициент отражения	75%/98%	75%/98%	75%/98%	98%	75%/98%	75%/98%
Диаметр зеркала	23 мм	20/23 мм	23 мм	3,5,10,15 мм		23 мм
Зеркальное покрытие	незапотевающее	незапотевающее	гидрофобное	незапотевающее	незапотевающее	незапотевающее
Замена зеркала	✓	✓	✓		✓	✓

Извлечение зеркала



Извлечение зеркала

Совместить отверстие "А" с иглой в ключе. Большим пальцем слегка прижать в месте, отмеченным оранжевым кружком. После чего плавно надавить на ручку зеркала.

Установка нового зеркала

Необходимо убедиться, что зеркало повернуто лицевой стороной вверх. Установить новую заглушку "Е" и новое зеркало "D" в нужное положение и надавить "С" в направлении "А". После того как зеркало будет установлено, снять защитную пленку.

Замена зеркал

А - отверстие с силиконовой заглушкой
В - иглка в ключе
С - ключ для замены зеркала
D - новое зеркало
Е - новая заглушка

Установка нового зеркала

